

دستور العمل نگهداری مانکن ها و مولاژهای آموزشی

نکاتی که باید در حفظ و نگهداری مانکن ها و مولاژهای آموزشی در مراکز مهارت‌های بالینی رعایت شود به شرح زیر می باشد:

۱. دمای نگهداری متوسط از ۵۰ درجه سانتی گراد تا ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب

۲. پوشیدن دستکش یکبار مصرف در هنگام شروع تمرین تا پایان برای استاد و دانشجو الزامی است

۳. از به کار بردن خودکار، الکل، بتادین در هنگام شروع تمرین و در زمان تمرین اکیدا خودداری گردد.

۴. جهت تمیز کردن مانکن ها و مولاژها فقط از پودر صابونلباسشویی بچه استفاده گردد (کمی پودر صابون با آب ولرم یا دستمالی که پرز ندهد اغشته نموده و متمم سطح مولاژ مورد نظر را تمیز نموده و در ادامه کف آن را با دستمال مرطوب پاک کرده و در انتها خشک نمایید.) از استفاده هر نوع ماده شوینده دیگر اکیدا خودداری نمایید.

۵. سطح پراتیک و مولاژها باید کاملا عاری از گرد و غبار باشد

۶. مانکنهای بزرگی که متصل به دستگاههای الکتریکی یا مشابه می باشند در یک جای ثابت نگهداری شوند و در صورت ضرورت برای جابجایی به محل دیگر با احتیاط کامل صورت گیرد تا در زمان جابجایی به مانکن و وسایل جانبی آن آسیب نرسد. ۷. مانکن هایی که باید در زمان آموزش از باتری تغذیه شوند نیز پس از اتمام باتری های آن خارج گردد تا سولفات نهنگردد البته برای مدت یک هفته ایجاد مشکل نخواهد کرد. این تذکر بیشتر برای زمانبست که محل پراتیک برای مدتی استفاده نگردد.

۷. جهت استفاده طولانی مدت و برای آسیب کمتر مانکن هایی که برای تزریق استفاده میشوند باید محل مورد نظر را قبل از شروع با گاز وازلین و یا وازلین چرب نمود و بعد تزریقات انجام شود و این عمل را بعد از هر ۵ بار تمرین مجدد انجام دهید.

۸. برای تزریقات وریدی و مایعاتی مشابه خون وارد رگ می شوند بعد از پایان تمرینات حتما مایع وارد شده و یا سرم تزریق شده کاملا خارج گردد و موضع را خشک نمایید. در صورتیکه کلاسهها فشرده است حداکثر تا ۴۸ ساعت مشکلی ایجاد نخواهد کرد ولی ضرورت دارد که بعد از این زمان کاملا خارج گردد. برای مانکن های سوچور هم از گاز وازلین قبل از بخیه استفاده شود.

۹. برای استفاده از مانکن هایی نظیر سوند معده، انما، اینتوبا سیون قبل از شروع حتما از ژل لوبریکانت استفاده نمایید و بعد از اتمام آموزش شسته و خشک گردد.

۱۰. در مانکن های مربوط به زنان و تشخیص بیماریهای زنان حتما قبل از استفاده از لوبریکانت استفاده شود و از وسایل مخصوص معاینه بیمار می توان استفاده کرد.

۱۱. برای استفاده از مولاژهایی که برای آموزش معاینات چشم، گوش، حلق و بینی استفاده قرار می گیرند می توانید از افتالموسک، اتوسکوپ... مخصوص بیماران بر روی این مانکن ها استفاده نمایید.